




Ablaufbeschreibung¹

Wichtig:

Die Verpackung erfolgt durch **sach-/fachkundige** Mitarbeitende. Herstellerangaben, die Vorgaben der Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV) sowie die gemeinsame Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) beim Robert Koch-Institut (RKI) und des Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) „Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten“ werden beachtet.

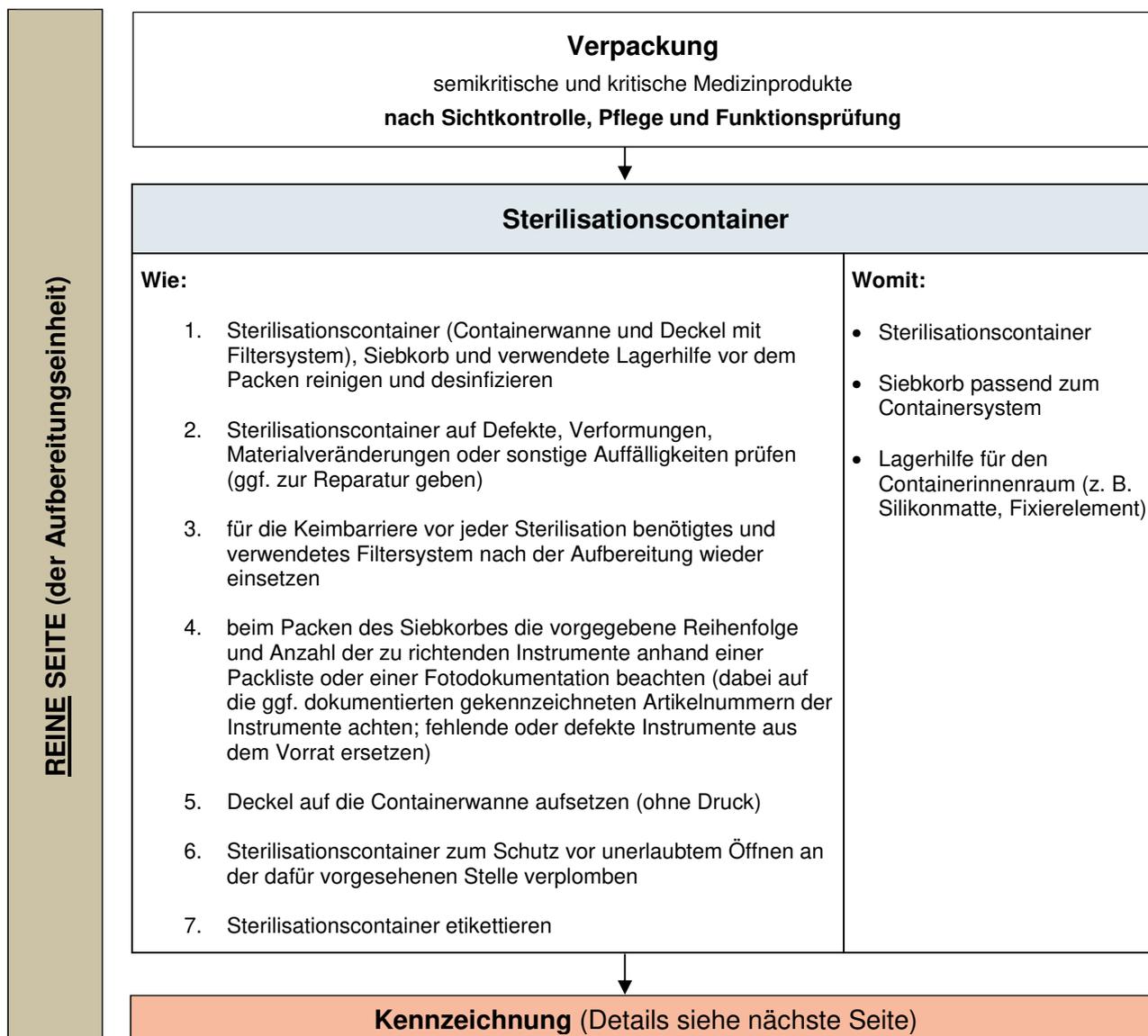

¹ In Anlehnung an die „Mustervorlage Hygieneplan für die Arztpraxis (Stand 2017)“ des Kompetenzzentrums Hygiene und Medizinprodukte



REINE SEITE

↓
Kennzeichnung

Wie:

- Chargenkennzeichnung und Sterilisierdatum
- Art des Sterilisationsverfahrens
- Prozessindikator
- Verfallsdatum/Sterilgutlagerzeit
- ggf. Anzahl der durchgeführten Aufbereitungen bei begrenzten Aufbereitungszyklen
- Information zu verpackender Person, z. B. Namenskürzel
- Bezeichnung des Verpackungsinhaltes

Womit:

sterilisationsfester
Faserschreiber/ Sterilisations-
Etiketten:

*(verwendetes Produkt hier
eintragen)*

Mitgeltende Dokumente:

Produktinformation/Herstellerangaben zu eingesetzten Instrumenten, Geräten und Aufbereitungsmaterialien